

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材 70858000
オキシガード®

【形状・構造及び原理等】

構成成分	形状	組成
表面硬化剤	ペースト	ポリマー (ポリエチレングリコール) 溶剤(グリセリン) 化学重合触媒、着色剤

【使用目的、効能又は効果】

・補綴修復材の辺縁部の歯科接着用レジンセメントの硬化

*【品目仕様】

項目	仕様
耐熱性	37± 1 で融解してはならない。

【操作方法又は使用方法等】

併用する材料

本材と併用する材料はつぎの通りです。

歯科接着用レジンセメント

(例えば「パナビア®フルオロセメント ペースト」)

使用方法

- 1) 練和した歯科接着用レジンセメントのペーストを補綴修復材の被着面に塗りつけ、窩洞、支台歯、或いは根管に密着させます。
- 2) 補綴修復材の辺縁から溢れたペーストを除去した後、補綴修復材の辺縁部に本材を塗布します。
- 3) 3分間放置してペーストが硬化した後、水洗して本材を除去します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

歯科接着用レジンセメントについては、当該製品の添付文書にしたがって使用すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

他の材料との併用、混和は避けること。

本材を誤飲させないように注意すること。

使用時の感染防止のため、小筆、スポンジ等を使用する場合、患者間での交差使用は避けること。

本材は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

万一本材の器材等の破損によって、鋭利な部分が発生した場合、手指等を傷つけないよう注意すること。

患者が誤って飲み込まないように、本製品で採用している先端ノズルは確実に取り付けること。

本材使用後はキャップが外れる可能性があるため、シリンジ先端部に付着したペーストを綿球等でふき取ってからキャップをすること。

2) 重要な基本的注意

本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。

本材が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合には、アルコール綿球等でふき取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・本材は、2~ 8 の冷蔵庫で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限]

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]

(例 Exp.  2006-01 は
使用期限 2006年1月を示す。)

【包装】

表面硬化剤 6 mL

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* 製造販売元:

クラレメディカル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
フリーダイヤル:0120-330922

製造元:

クラレメディカル株式会社

〒710-0801 岡山県倉敷市酒津1621

販売元:

 **株式会社 MORITA**

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15

TEL (03) 3834-6161

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

TEL (06) 6380-2525

「オキシガード」「パナビア」は、(株)クラレの登録商標です。