

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料 70815000
(歯科金属用接着材料) (歯科用象牙質接着材) (歯面処理材)

クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構成成分	形状	組成
アクティベーター	液体	モノマー(メタクリル酸モノマー) シランカップリング剤、その他

【使用目的、効能又は効果】

歯科用複合レジン充填材料及び歯科用ポーセレン、歯科用金属あるいは歯牙との接着に用いる歯科用接着材料の接着増強。

*【品目仕様等】

項目	仕様
吸水量	5.0mg/cm ² 以下

【操作方法又は使用方法等】

陶材被着面の酸処理

陶材被着面の酸処理をリン酸エッチング材(例えばKエッチャント GEL)の添付文書にしたがって行います。

液剤の混和

歯科コンポジットレジン用接着材料の所定量と本材を混和皿に取り混和します。

参考：歯科コンポジットレジン用接着材料の使用例

「クリアフィル®メガボンド®」ではプライマーと本材を等量、混和します。

「クリアフィル®ライナーボンド」ではプライマーA液、プライマーB液及び本材を等量、混和します。

「クリアフィル®ニューボンド」及び「クリアフィル®フォトボンド」ではキャタリスト液、ユニバーサル液及び本材を等量、混和します。

混和液の塗布

混和した液を陶材被着面(露出金属面)或いは歯面に塗布します。

揮発成分の蒸散

エアアシリンジ等により空気流を吹き付け、接着材料を薄い均一な膜とし、また接着材料中の溶剤(蒸発成分)を蒸発除去します。

硬化

光重合型の歯科コンポジットレジン用接着材料の場合には添付文書にしたがって光照射します。

充填修復

歯科充填用コンポジットレジンの添付文書にしたがって行います。

【使用上の注意】

1) 使用注意

本材の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。

本材は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。

照射光は直視を避けて、保護眼鏡等の保護処置を施すこと。

本材を誤飲させないように注意すること。

使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。

本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。

本材が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合には、アルコール綿球等でふき取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。


【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・本材は、2～8℃の冷蔵庫で保管し、直射日光等の近くに置かないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限]

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]

(例  2005-7は
使用期限2005年7月を示す。)

【包装】

- ・アクティベーター (4 mL)
- ・アクティベーター (1 mL)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* 製造販売元:

クラレメディカル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
フリーダイヤル: 0120-330922

製造元:

クラレメディカル株式会社

〒710-0801 岡山県倉敷市酒津1621

販売元:

株式会社モリタ

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15

TEL (03)3834-6161

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

TEL (06)6380-2525

「クリアフィル」メガボンドは、(株)クラレの登録商標です。