

歯科材料5 歯科用接着充填材料
* 管理医療機器 歯科用エッチング材 36153000

K エッチャント G E L

*【形状・構造及び原理等】

構成成分	形状	組成
エッチング材	液体	精製水 りん酸 着色剤 増粘剤
付属品		混和皿、小筆

* *【作動・動作原理等】

本品はりん酸の酸性度により歯又は歯科修復物の清掃及び微小凹凸面の形成を行う。

* *【使用目的、効能又は効果】

歯又は歯科修復物のエッチング(技工専用を除く。)に用いる。

* *【品目仕様等】

項目	仕様	試験方法
pH	1.60 ~ 2.10	JIS Z 8802

【操作方法又は使用方法等】

エッチング材の塗布
エッチング材を混和皿に取り、小筆を用いて窩洞(エナメル質及び象牙質)に塗布する。
エッチング材の水洗、乾燥
40秒間処理した後、エッチング材を水洗し、窩洞を乾燥する。
接着、充填操作
組合わせて使用する歯科用象牙質接着材料の塗布、歯科充填用コンポジットレジン等の充填を行う。当該品の使用方法は添付文書にしたがうこと。

[使用方法に関連する使用上の注意]

エッチング処理をした歯面が唾液等で汚染されないように注意すること。
汚染された場合は再度エッチング処理を行うこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

本材の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
本材を誤飲させないように注意すること。
本材は、性能、使用目的、効能又は効果の項に記載の用途以外には使用しないこと。
本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。

- * 本材が衣服に付着した場合は水洗すること。本材は静置すると硬化することがあります。硬化した場合は、キャップをしたまま容器を振ると元の液状に戻ります。

2) 重要な基本的注意

本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。
本材が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合は、アルコール綿球等でふき取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

本材は、2 ~ 25℃で保管すること。
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

[使用期限]

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]

(例 $\text{Exp} \begin{array}{|c|} \hline \times \\ \hline \end{array} 2008-08$ は
使用期限2008年8月を示す。)

【包装】

エッチング材 6 mL

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* * 製造販売元:

クラレメディカル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
フリーダイヤル:0120-330922

* 製造元:

クラレメディカル株式会社

〒710-0801 岡山県倉敷市酒津1621

販売元:

株式会社モリタ

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15

TEL (03)3834-6161

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

TEL (06)6380-2525