

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用エッチング材 36153000

パナビア® エッチング剤 V

【形状・構造及び原理等】

構成品	形状	組成
エッチング材	ゲル状の液剤	精製水 りん酸 着色剤 増粘剤

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

接着ブリッジ及び接着スプリント合着時の歯質(エナメル質及び象牙質)のエッチング処理

*【品目仕様等】

項目	仕様
酸濃度	りん酸(H ₃ PO ₄)として30重量%以上を含有

【操作方法又は使用方法等】

本材の採取

本材を混和皿に採取します。

本材の塗布

小筆を用いて直接歯質に塗布するか、又は小筆を用いてリテーナーの内面に塗布し、リテーナーを歯面に圧接します。

本材の水洗、乾燥

下表のとおり60～90秒処理後、水洗し、乾燥します。

被処理面	唇面、切削面	舌面
処理時間	1回目：30秒	1回目：30秒
	2回目：30秒	2回目：60秒

合着操作

組合わせて使用する歯科用セメントキット(例えば「パナビア®フルオロセメント」)等を用い、添付文書にしたがって合着操作を行います。

[使用方法に関する使用上の注意]

エッチング処理をした歯面が唾液等で汚染されないように注意すること。
汚染された場合は再度エッチング処理を行うこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

本材の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。

本材を誤飲させないように注意すること。

本材は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。

本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。

2) 重要な基本的注意

本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。

本材が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合には、アルコール綿球等でふき取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

本材は、2～25℃の暗所で保管すること。

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

[使用期限]

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。

記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]

(例 Exp. 2007-05 は

使用期限2007年5月を示す。)

【包装】

エッチング材 5 mL

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* 製造販売元:

クラレメディカル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
フリーダイヤル:0120-330922

製造元:

クラレメディカル株式会社

〒710-0801 岡山県倉敷市酒津1621

販売元:

MORITA 株式会社モリタ

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15

TEL (03) 3834-6161

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

TEL (06) 380-2525

「パナビア」は、(株)クラレの登録商標です。